


# MEDIDOR UNIVERSAL

MILIMÉTRICO A COLORES GRADUADO CON ANILLO DE SILICONA

## IBO

Calidad Garantizada de **POR VIDA.**

Medidor necesario para tomar visualmente la profundidad gingival de los implantes (*hexágono interno o externo*) para pedir un "BALL-ATTACH" con altura exacta del borde de curación.

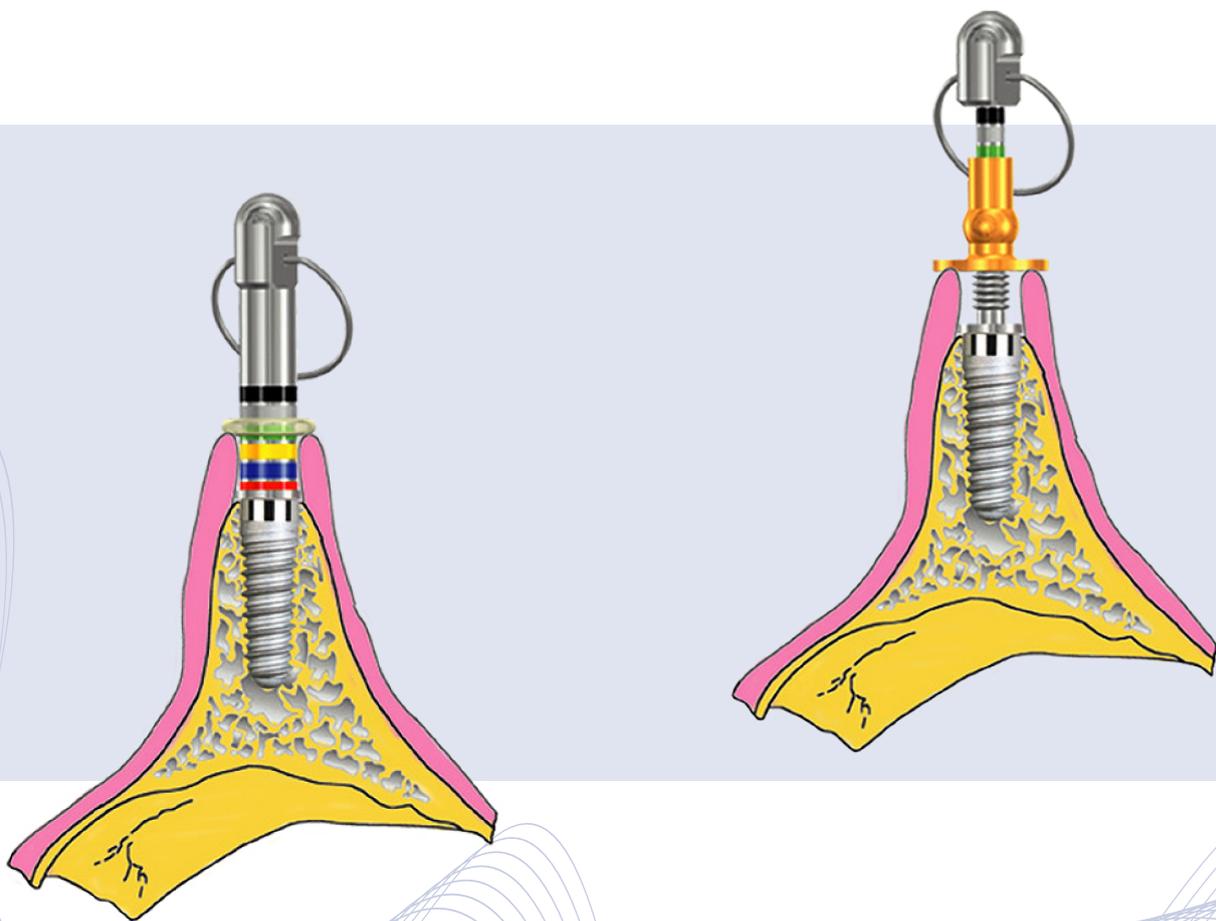

# MEDIDOR UNIVERSAL

## MILIMÉTRICO A COLORES GRADUADO CON ANILLO DE SILICONA

- Mantener el plato giratorio atornillado por encima, lejos de pivote con la base de apoyo del perímetro sobre el implante.
- Insertar el tallo del medidor en el implante hasta apoyar el perímetro de la base. El plato giratorio estará lejos de la encía.
- Sostener el medidor con los dedos y girar la placa en sentido horario, que se reducirá en la encía.
- Cuando la base del plato roce la encía, delimitará la altura del borde gingival.
- Retirar el medidor de la boca, leer el color. El área de color donde el medidor se detiene, indica la altura del BALL-ATTACH que se necesitará, redondeando al milímetro. Cuando un color se cubre totalmente o casi, es aconsejable referirse al color superior.

**Ejemplo:** Para ordenar un BALL-ATTACH, especificar marca y el tipo de planta, diámetro, color de la altura indicada. Este código de color corresponde a un milímetro que, partiendo de la base del implante, mide la altura de los bordes de curación de los BALL-ATTACH. Estos van de 0,5 mm. a 7 mm. de hexágono interno. Para los implantes de hexágono externo la altura varía de 1 mm. a 6 mm., dependiendo del tamaño del hexágono sobre el implante.

### MEDIDOR UNIVERSAL "BG" MILIMÉTRICO A COLORES GRADUADO CON ANILLO DE SILICONA

Sirve para definir la altura de un borde gingival, en los casos donde entre los dientes no hay el espacio necesario para utilizar el medidor con rodilla. También puede ser útil para medir la altura de los bordes de las plantas con tamaños y formas particulares.

Los anillos de silicona (O-ring) no se esterilizan (desechables). Hay kits de recambio. Para instalar los anillos de silicona sobre el medidor es necesario el **DISPENSADOR de anillos**.

